

SO 19.06.11		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Auswertung			
	HI																										103	IE/BE 1,7 TGD 67,8	
	250																												
	200																												
	130	196												155	137														
	70																		88					108					
	50											48	55							50									
	LO																												
Ereignis											T3 -	NBZ T3		T4	T4				T6	T6				T7					
BE															3				3		2,6	3,4					12,0		
Bolus		2,5													4				5,1		4,4	4,2					20,2		
Basal		47,63																									47,6		
Basalprofil		1,275	1,7	1,7	1,7	2	2,1	2,3	2,1	2	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	2,1	2,3	2,1	2,1	2,4	2,4	2,25	2,25	1,9		47,5		
Bemerkung		00:07 STOP START 19.06.11 00:23 / 20:57: FILL CANNULA 0,50 U / 20:55: FILL CANNULA 0,50 U / 20:54: PRIME 5,26 U / 11:41 STOP START 19.06.11 11:44																							MBZ der Woche 103				

Darstellung mit den Standardoptionen

[illegible]

Anzeige des
Profilnames
abhängig von
SiDiary Einstellung

Skalierung der Bereiche abhängig von SiDiary Therapiezielen

Darstellung der Werte und
des Zeitformates abhängig
von Einstellungen in SiDiary

DI 21.06.11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Auswertung		
HI																									5,1	Sport	
12,4																										♥	
11,1																										Gewicht lbs	
7,2																8,7										192,2	
3,9		3,3											4,7			5,4		6,8			4,2	3,3				4,8	Blutdruck
2,8																											
LO																											
Ereignis													NBZ													IE/BE	
BE			0,7	1,2										0,6			2				0,7	3,4				8,6	2,1
Bolus			1	1,75										0,75			1,95	4,1			2,8	5,7				18,1	TGD
Basal	48,16																									48,2	66,2
Basalprofil [Wochentag]	1,7	1,7	1,7	1,7	2	2,1	2,3	2,1	2	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	2,1	2,3	2,1	2,1	2,4	2,4	2,25	2,25	1,9		47,9	
Bemerkung	02:19 STOP START 21.06.11 02:20 / 01:19 STOP START 21.06.11 01:27 / 1:15a: 30' Radfahren (+) /																										MBZ der Woche
																											5,1

Patientin/Patient mit Zeiteinstellung
Am/Pm, lbs und mmol/L

Weindl-Kuttny, Erwin (23.11.58)

Zeitraum: 26.03.11 - 24.04.11
30 Tage

Insulintherapie - persönliche Informationen

Diabetes Typ: 1

Insulinpumpe bzw. Pen: Animas 2020i, NovoPen 4

Insulin: (32%) Novo Novorapid

Blutzucker-Zielbereich: 70 - 130 mg/dl

(68%) Novorapid

BE bzw. KE-Faktor:

Zeit	Für 1 BE bzw. KE benötige ich ... Einheiten
Morgens	2 IE (1 I.E. für 6 gr. KH)
Mittags	1,7 IE (1 I.E. für 7 gr. KH)
Abends	2,4 IE (1 I.E. für 5 gr. KH)

Korrekturfaktor:

Zeit	Eine Einheit Insulin senkt den Blutzucker um ... mg/dl bzw. mmol/l
Morgens	30 mg/dl
Mittags	35 mg/dl
Abends	30 mg/dl

Errechneter HbA1c Wert	5,9 % 41,0 mmol/mol
Mittelwert BZ / NBZ	114 / 101 mg/dl
Körpergewicht	89,1 kg
Insulin/ kg Körpergewicht	0,77 IE kg

Anzahl der Messungen	407 \varnothing 14
Unterhalb Hyposchwelle	1 < 50
Oberhalb Hyperschwelle	7 > 200
Standard Abweichung	50,9 mg/dl

Für ihre Notizen:

WOCHEN-VERLAUF

Blutzucker

Durchschnittswerte

Insulin

Kalenderwoche	MBZ/NBZ	Anzahl Messungen	TGD	Basal	Bolus
001. (#2) 12/2011	128/90 mg/dl	34 pro W. / 17 pro T.	73	(65%) 48	(35%) 26
002. (#7) 13/2011	116/115 mg/dl	86 pro W. / 12 pro T.	75	(65%) 49	(35%) 26
003. (#7) 14/2011	123/117 mg/dl	100 pro W. / 14 pro T.	72	(66%) 47	(34%) 25
004. (#7) 15/2011	104/95 mg/dl	104 pro W. / 15 pro T.	64	(70%) 45	(30%) 19
005. (#7) 16/2011	113/93 mg/dl	83 pro W. / 12 pro T.	60	(71%) 43	(29%) 18

SO 19.06.11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Auswertung	
HI																									103	IE/BE 1,7 TGD 67,8
200																										
130	196												155	137												
70																		88				108				
50											55								50							
LO										48																
Ereignis										T3 -	NBZ T3			T4	T4			T6	T6			T7				
BE																		3		2,6	3,4					
Bolus	2,5																	5,1		4,4	4,2					
Basal	47,63																									
Basalprofil	1,275	1,7	1,7	1,7	2	2,1	2,3	2,1	2	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	2,1	2,3	2,1	2,1	2,4	2,4	2,25	2,25	1,9		
Bemerkung	00:07 STOP START 00:23 / 20:57: FILL CANNULA 0,50 U / 20:55: FILL CANNULA 0,50 U / 20:54: PRIME 5,26 U / 11:41 STOP START 11:44																									

Datum der automatischen
Bemerkung vom Import wurde
entfernt da es sich um diesen Tag
handelt.

SO 19.06.11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Auswertung		
HI																										103	
250																											
200																											
130	196												155	137													
70																		88				108					
50											48	55							50								
LO																											
Ereignis										T3 -	NBZ T3			T4	T4			T6	T6				T7				IE/BE
BE															3			3		2,6		3,4				12,0	1,7
Bolus	2,5														4			5,1		4,4		4,2				20,2	TGD
Basal	47,63																									47,6	67,8
Basalprofil		1,7	1,7	1,7	2	2,1		2,3	2,1	2	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	2,1	2,3	2,1	2,1	2,4	2,4	2,25	2,25	1,9		47,5	
	1,275																										
Bemerkung	00:07 STOP START 19.06.11 00:23 / 20:53: FILL CANNULA 0,50 U / 20:55: FILL CANNULA 0,50 U / 20:54: PRIME 5,26 U / 11:41 STOP START 19.06.11 11:44																							MBZ der Woche 103			

Option
ANZEIGE_BASALRATE_RELATIV = 1
 skaliert nach höchstem bzw. niedrigstem Wert des ersten Ausgabetales.
 Vorgabe bis 1 = 1. Zeile, bis 2 = 2. Zeile, bis 3 = 3. Zeile und über 3 = 4. Zeile der Basalratenwerte.

Option
EREIGNIS_TN_ANZEIGEN = 0
 unterdrückt die Ausgabe der Ereignisse T1 bis T8 da sie optisch zuordenbar sind.
 Siehe nächste Seite

SO 19.06.11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Auswertung		
HI																										103	
250																											
200																											
130	196												155	137													
70																		88				108					
50											55								50								
LO										48																	
Ereignis											NBZ																
BE														3				3		2,6	3,4					12,0	IE/BE
Bolus	2,5													4				5,1		4,4	4,2					20,2	1,7
Basal	47,63																									47,6	67,8
Basalprofil		1,7	1,7	1,7	2	2,1	2,3	2,1	2	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	2,1	2,3	2,1	2,1	2,4	2,4	2,25	2,25	1,9	7,5	MBZ der Woche 103	
	1,275																										
Bemerkung	00:07 STOP START 19.06.11 00:23 / 20:57: FILL CANNULA 0,50 U / 20:55: FILL CANNULA 0,50 U / 20:54: PRIME 5,26 U / 11:41 STOP START 19.06.11 11:44																										

Differenz des übertragenen Wertes von der Pumpe und dem eingetragenen Basalprofil von SiDiary

Kann mit der Option PROFIL_SUMME = 0 unterdrückt werden.

SO 19.06.11	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Auswertung	
HI																										
250																										
200																										
130	196												155	137												
70																		88,5					108			
50											55								50							
LO										48																102,9
Ereignis										-	NBZ															
BE																		3		2,6	3,4					12,0
Bolus	2,5													3				5,1		4,4	4,2					20,2
Basal	47,63													4												47,6
Basalprofil		1,7	1,7	1,7	2	2,1	2,3	2,1	2	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	2,1	2,3	2,1	2,1	2,4	2,4	2,25	2,25	1,9		47,5
	1,275																									
Bemerkung	00:07 STOP START 19.06.11 00:23 / 20:57: FILL CANNULA 0,50 U / 20:55: FILL CANNULA 0,50 U / 20:54: PRIME 5,26 U / 11:41 STOP START 19.06.11 11:44																									MBZ der Woche
																										102,9

Mit aktivierter Option RUNDEN=1
Vorgabe automatisches Runden
mmol/L = 1 bzw. 0 bei mg/dL

SO 19.06.11	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Auswertung		
HI																									103		IE/BE
250																											
200																											
130	196												155	137													
70											55							88				108					
50																			50								
LO										48																	
Ereignis										-	NBZ																
BE														3				3		2,6	3,4						
Bolus	2,5													4				5,1		4,4	4,2						
Basal	47,63																										
Basalprofil	1,275	1,7	1,7	1,7	2	2,1	2,3	2,1	2	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	2,1	2,3	2,1	2,1	2,4	2,4	2,25	2,25	1,9			
Bemerkung	00:07 STOP START 19.06.11 00:23 / 20:57: FILL CANNULA 0,50 U / 20:55: FILL CANNULA 0,50 U / 20:54: PRIME 5,26 U / 11:41 STOP START 19.06.11 11:44																							MBZ der Woche 103			

Option
SIDIARY_FARBEN = 1

Mit der Option MO_IMMER_OBEN = 1 beginnt die Ausgabe immer mit MO am Seitenanfang und endet mit SO am Seitenende wo gleichzeitig die Wochensumme ausgegeben wird.